

## Návod na použitie

### Používanie nanofotonického fullerénového filtra BIOPTRON


- Prístrojom BIOPTRON s nasadeným nanofotonickým fullerénovým filtrom namierte zo vzdialenosti približne 10 cm na oblasť určenú na aplikáciu terapie svetlom.
- Pri aplikácii na malú plochu, ktorú lúč svetla úplne pokryje, udržiajte prístroj v stabilnej polohe. Pri aplikácii na rozsiahlejšiu plochu aplikujte na jednotlivé časti podľa odporúčanej dĺžky svietenia, prístrojom nepohybujte.

Patentovaný nanofotonický fullerénový filter BIOPTRON disponuje unikátnymi vlastnosťami molekúl  $C_{60}$ , známych ako fullerény, a vydáva hyperpolarizované vertikálne lineárne polarizované svetlo (HPS). HPS navodzuje harmóniu a rovnováhu v energeticky narušených biologických štruktúrach, čím urýchľujú prirodzený proces liečby.



## Výmena filteru

1. Opatrne odstráňte originálny filter prístroja BIOPTRON. Tento filter je podstatnou súčasťou terapie svetlom BIOPTRON, avšak s nanofotonickým fullerénovým filtrom sa nepoužíva (obrázok 1a pre BIOPTRON Compact a MedAll, obrázok 1b pre Biopton Pro1). **Dotýkajte sa iba krúžku filtera a nie skla.**

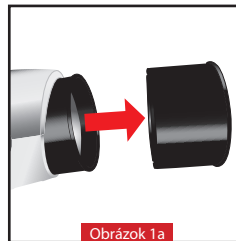


Obrázok 1a



Obrázok 1b

2. Do prístroja BIOPTRON opatrne vložte nanofotonický fullerénový filter (obrázok 2a pre BIOPTRON Compact a MedAll, obrázok 2b pre Biopton Pro1). Po použití filter opatrne odstráňte.

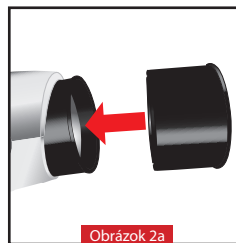

Obrázok 2a



Obrázok 2b

**Upozornenie:** Prístroj nepoužívajte bez filtera.

## Čistenie nanofotonického fullerénového filtera BIOPTRON

1. Odstráňte filter z prístroja. Dotýkajte sa iba krúžku filtera.
2. Na čistenie používajte mäkkú, hladkú mokrú textilnú utierku a jemný saponát na sklo. Saponát (v malom množstve) nanášajte na utierku a nie priamo na sklo.
3. Osušte filter ďalšou hladkou utierkou.

### Upozornenie:

- Dbajte na to, aby sa na filter neprášilo.
- Na čistenie vnútornej alebo vonkajšej strany filtera nepoužívajte žiadne chemikálie ani izopropylalkohol.
- Filter uchovávajte v puzdre pri izbovej teplote.
- Filter je vyrobený z krehkého materiálu a musí sa s ním teda zaobchádzať opatrne.